




Colocarles
su **BIOchip**
es darles
identidad.



Dale seguridad y tecnología a tus **clientes.**

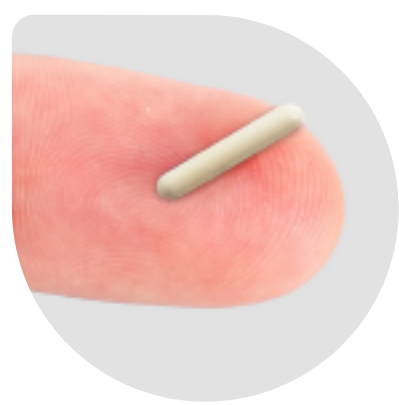

¿Qué es el BIOchip?

- Es un circuito computarizado pasivo que posee un Código de identificación, inalterable, único y de por vida.
- De material biocompatible que se aplica rápidamente de manera subcutánea.



¿Para qué sirve el BIOchip?

- Para acreditar la veracidad de los certificados de Salud.
- Certificar al animal para viajes internacionales.
- Para facilitar la recuperación del animal en caso de extravío/robo.
- Verificar que una persona sea legítima propietaria de un perro o gato a través de la lectura del código.



¿Qué ventajas tiene BIOchipear en tu veterinaria?

- Digitalizar el historial clínico.
- Proveer un servicio para certificar y registrar animales.
- Promover la tenencia responsable.
- Ofrecer un servicio tecnológico en continuo auge.


¿Cómo se coloca el BIOchip?



Con el lector de microchip, escanear el perro o gato para asegurarse que no tenga otro implantado previamente.



Si el animal no posee un microchip, antes de colocarlo, controlar el correcto funcionamiento de este a través del lector para asegurarse que el número es el mismo de las etiquetas que acompañan el producto.

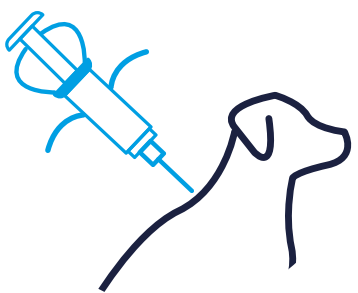

Realizar la asepsia y aplicar de forma subcutánea con la jeringa entre los omóplatos del animal.



Buscar el microchip utilizando el lector para confirmar la aplicación.

Registrar el animal sin costo en www.petlink.vet



El **BIOchip** cumple con las normas ISO 11784/5 y está registrado en ICAR con el código 981. Listo para su aplicación y envasado en un blíster estéril con su jeringa junto a 6 etiquetas de identificación con código de barras.

Lector Portátil para Identificación Animal

Capaz de leer microchips FDX-B y HDX y almacenar hasta 940 códigos de identificación en su memoria interna.

